



# ドクターエルCC

## 取扱説明書

車のシートで現代主流になってきているバケットシートに対応するために作られたクッションがドクターエルCCです。発売から30年以上のロングセラーであるドクターエルクッション<sup>®</sup>の機能を継承し、絶妙な硬さと角度により運転中に腰にかかる負担を軽減します。

ドクターエルCCは、まさに車専用の腰痛対策クッションです。

長距離の運転が辛い

運転していると腰が痛くなる

身体が沈み込んで運転しにくい

小柄で前方が見づらい

---


商品を正しくお使いいただくためにも、この取扱説明書を必ずお読みください

# 絶妙な「硬さ」と「前傾角度」が、座り疲れを軽くする



パケットシートにジャストフィット!!

ドクターエルCCの特長は、身体に合う絶妙な硬さです。これにより骨盤を立たせます。また芯材に傾斜をつけることで腰に負担がかからない姿勢を運転中でもキープできます。

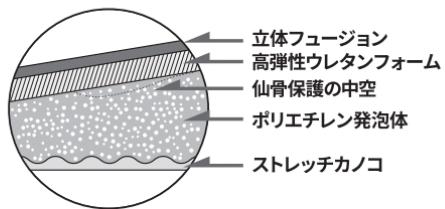

しっかりとした硬さが備わっているポリエチレン発泡体は、坐骨を安定させるために必要不可欠な素材です。また耐久性に優れているので、丈夫で長持ちします。この素材に高弹性ウレタンフォームを重ねたことで反発性が加わり、座り心地を良くします。

またカバーは立体メッシュにより通気性抜群。長時間の運転時の蒸れも解消します。

## 使用方法


- 車のシートに敷いてお使いください。  
基本として厚い方を後ろに、薄い方を前にします。
- 背もたれとしてお使いの場合は厚い方を下にしてください。



## 使用用途

### Healthy

座面に敷いて使う場合

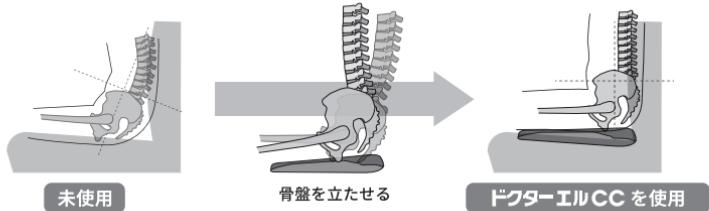


クッション無しでは身体が沈み込み、姿勢が悪い状態になってしまいます。

ドクターエル CC のもつ硬さと前傾形状が沈み込みを抑えます。

それにより腰への負担が緩和され、座り疲れを軽減します。

### Relaxation

背面に立てて使う場合

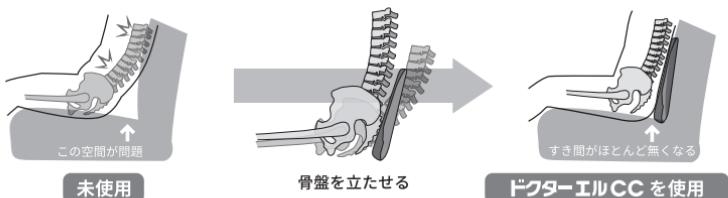

クッション無しでは、腰と背もたれとの間が空いてしまうことで、  
背中が丸まってしまいます。

ドクターエル CC を腰部に当てることで骨盤が立ちます。

それにより腰にかかる負担が分散され、よりリラックスした姿勢をつくります。

## [ドクターエルクッション。シリーズ]

### ドクターエルCC



車専用

持ち運びに特化

Dr-L mini cushion



軽量で持ち運び便利な腰痛対策クッション。スポーツ観戦や旅行での道中などに。

長時間座る方に

ドクターエルEX



一日の大半を座って過ごされる方におすすめの腰痛対策クッション。

様々な用途に

Dr-L cushion



腰痛対策クッションとして 30 年以上のロングセラー。オフィスやリビング、また背凭れとしてもお使いいただけます。

## 使用上の注意点

- ・ご使用中、腰や背中などに痛み等が出ましたら使用を中止してください。
- ・カバーのみ洗濯可。(洗濯方法は、カバー内側に表示)
- ・乾燥機、タンブラー乾燥はしないでください。
- ・メッシュ部分にゴミが入った場合は、掃除機を軽く当て吸い取ってください。

## 組成

外カバー：表（メッシュ）：ポリエステル 86% ポリウレタン 14%

裏：ポリエステル 100%

芯材：ポリエチレン発泡体 クッション材：ウレタン

サイズ（約）：縦 310×横 370×厚さ 50（最高厚）（mm）

重量（約）：約 215g

※上記は性能向上のため予告なしに変更することがあります

## 製造元

株式会社 ドクターエル

〒326-0807 足利市大正町870-1

お客様お問い合わせ窓口 ☎ 0120-460-361

ホームページ

[www.dr-l.co.jp/](http://www.dr-l.co.jp/)