


Dr-L mini cushion  
ドクターエル ミニ

取扱説明書

小粒でも、驚きの機能

座って、寄りかかって  
すぐに骨盤、坐骨に違いを感じる！

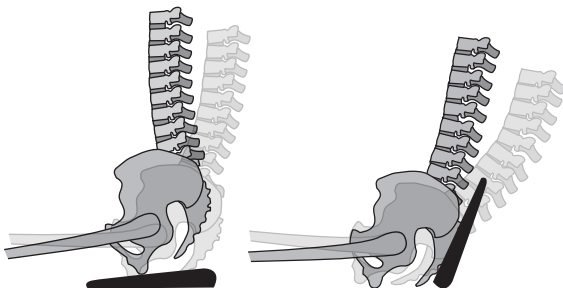

芯材の6度前傾斜が骨盤を前に押し出し骨盤にかかる負担を軽減させ同時に絶妙な硬さが骨盤の不安定な動きに対応し正しい姿勢と爽快な環境をつくりだします。


商品を十分に理解していただくためにも、この取扱説明書を必ずお読みください

- 姿勢の悪い方 ●坐骨、仙骨が座面に当たりやすい方
- お子様用にも ●猫背気味の方



旅行・スポーツ観戦・アウトドア・オフィス・ご自宅、あらゆるシーンでお役に立てます

## サイズ

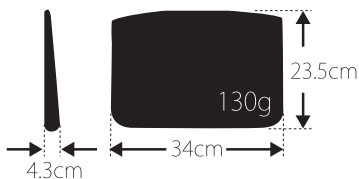


いつでもどこでも携帯クッション  
重さ 130g とコンパクトサイズです

## フレキシブルな素材




筋肉に力を入れた時の弾力性に似た素材を使用しております 軽量で曲げに強く復元力を兼ね備えています

## 6度の傾斜

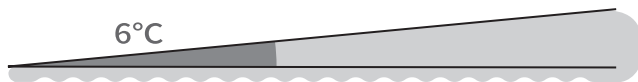


クッションに傾斜を持たせることで骨盤が自然に前に押し出され、シャキッと正しい姿勢をつくりだします

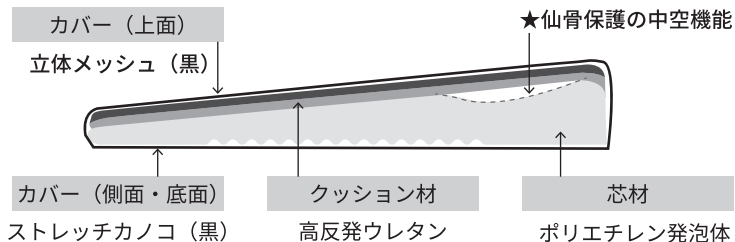


# 肌弾力に近づけたちよつと硬めの素材と 前傾斜があなたの腰を守ります

## 左右に安定

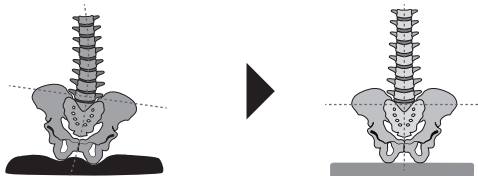


絶妙な硬さが上半身を安定させることで坐骨がブレず  
長時間座っていても疲れません

## 前に起こしシャキッと

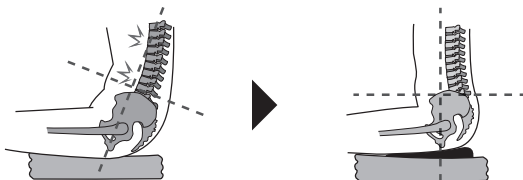

クッションとしてお使いの場合は背もたれにもたれず座ります  
骨盤が前に出てシャキッとした姿勢を維持できます

## もたれて安心

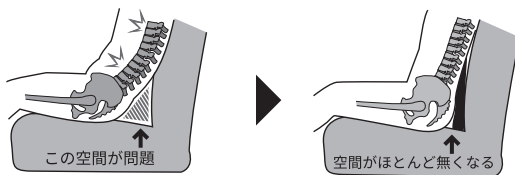

背もたれにお使いの場合はクッションの厚い部分を下にしてお使いください  
骨盤が立ち、良い姿勢のままリラクゼーションを味わうことができます



芯材の6度前傾斜が骨盤を前に押し出し腰にかかる  
負担を軽減させます。

同時に絶妙な硬さが骨盤の不安定な動きに対応  
正しい姿勢と爽快な環境をつくりだします。


- 冬は保温、夏は通気性あり
- 骨盤を前に起こす
- 腰への負担を軽減
- 坐骨を安定させる
- 坐骨に優しいクッション性
- 仙骨保護の中空機能
- 軽量：約 130g

必要最小限の大きさで機能充実



### ● 椅子での使用方法

椅子の座面にお使いの場合、座面の高さを  
2 cm 下げてください  
椅子の座面は平行にしてください（右図）  
また、基本として薄い方を前にファスナー側  
を後ろにします

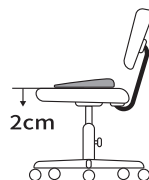

### ● 腰当て（背当て）としての使用方法

腰当て（背当て）にお使いの場合、  
厚い方（ファスナー側）を下にしてお使いください



注意

- ご使用中、腰や背中などに痛み等が出ましたら使用を中止してください
- カバーのみ洗濯可（洗濯方法は、カバーのファスナー裏側に表示）乾燥機、タンブラー乾燥はしないでください
- メッシュ部分にゴミが入った場合は掃除機を軽く当て吸い取ってください

### 品質表示

外カバー：表（メッシュ）：ポリエステル 86% ポリウレタン 14%

裏：ポリエステル 100%

芯材：ポリエチレン発泡体 クッション材：ウレタン

サイズ：縦 23.5×横 34×厚さ 4.3（最高厚）（cm）

※上記は性能向上の為に予告なしに変更することがあります

日本製



株式会社 ドクターエル

〒326-0807 足利市大正町 870-1

www.dr-l.co.jp

TEL 0284-40-3711